

使用说明书

【产品名称】

商品名：凝必敷乳贴

英文名：AgniGel Nursing mothers

【组 成】天然琼脂、PVP、PEG、蒸馏水

【产品性能】纯天然琼脂成份，无任何毒副作用；通过与创面组织接触后，能有效促进创面组织细胞的上皮化进程，加速表皮细胞的新陈代谢速度；无粘连性，从而避免因更换时引起的疼痛和再次的创伤；提供光滑平整的皮肤组织结构修复平台，有效防止创面区因肉芽组织过度增生而产生的疤痕；具有良好的单向透气性能，可以阻止细菌渗透进入创面区，抑制细菌生长；能吸收创面的渗出物并清除坏死组织；完全清澈透明，能直接透过敷料有效观察到创面区各修复阶段的组织愈合进展状况；能使创面区组织和周围的皮肤保持在最佳合适水平的湿度环境中，产生清凉和舒畅的感觉，能够减轻局部创面组织因创伤引起的疼痛，维持湿性愈合；促进继续母乳喂养的进程。

【规格型号】AGN-1010（Φ10cm）

【适用范围】适用于因哺乳期母乳喂养或其它机械性损伤引起的乳头皲裂与乳头破损创面的修复，预防乳头皲裂与乳头破损的发生，促进乳头及乳晕周边区域皮肤的湿润与光滑，促进乳头及乳晕周边区域皮肤的色素沉着恢复正常。

【使用方法】

- 1、乳头创面区清创消毒后，打开包装前，请再次确认手和乳头创面区域是清洁、无污染的。
- 2、从开口处撕开无菌包装，去除凝必敷乳贴表面的透明隔离膜，用手捏住凝必敷乳贴上端的背衬带，轻轻的将凝必敷乳贴从塑料保护膜上取下。
- 3、将凝必敷乳贴粘贴在乳头创面区域；粘贴完毕后可以正常的穿上内衣（不会对内衣造成任何的污染）。

【禁忌症】对本品过敏者禁用，停用即可。

【注意事项】

- 1、使用前应先对乳头创面区彻底的清创，以防感染。
- 2、本产品应由医生在无菌条件下使用；如果您希望延长单次的使用时间，可以先将凝必敷乳贴浸泡在蒸馏水或者生理盐水中 1-2 分钟后再使用。
- 3、开始进行母乳喂养前，请确定乳头区域已经去除了凝必敷乳贴，并确保乳头区域的皮肤表面无任何凝必敷乳贴颗粒物的粘附，然后才能开始进行授乳；以后，每次授乳都重复上述流程。如需持续长期治疗使用，可能会出现创面周围的正常皮肤组织有被软化的现象，可酌情使用氧化锌软膏进行涂抹防护。

4、如把创面暴露在特别干燥或超高温的气候环境中，凝必敷乳贴内含有有效成份的消耗速度会比常温下更快；为了避免失去更多的有效成份，可以在凝必敷乳贴上再覆盖一层经蒸馏水或生理盐水浸湿的纱布；在更换凝必敷前，建议酌情可以用经蒸馏水或生理盐水浸湿的纱布覆盖 2-4 次，这样能最大程度上减少因凝必敷自身硬化而引起的疼痛和再次创伤。

5、本产品经 r 射线灭菌，若发现密封的外包装出现破损则禁止使用；一经拆封就立即失去了无菌性，因此请务必及时尽快的一次性使用。

【警告】每天至少需要更换一次或者酌情决定更换的次数；凝必敷乳贴可以与防溢乳垫的产品同时使用；不宜用在同时伴有严重感染和大量渗出的乳头创面区域上；如果治疗时间超过 15 天后，乳头区域的创面仍然未能有效的愈合，请停止使用并及时咨询医生。

【贮存条件】产品的完整包装应储存在避光、凉爽的室温环境下。

【有效日期】二年

【生产日期】见外包装盒

【生产批号】见外包装盒

【注册证号】国械注进 20183642066

【产品标准】YZB/TUR 7822-2013

【产品标签所用的图形、符号的解释】

生产日期	
生产批号	
有效期至	
一次性使用标志	
灭菌标志	
参考使用说明书标志	
包装破损禁止使用标志	